

GAS PARA TAMPONAMIENTO INTRAOCULAR

REFERENCIA: AL-GOT 009-00

MARCA: ALCHIMIA



Descripción:

Gas C_3F_8 (octafluoropropano) de alta pureza, con tensión superficial alta para excelente tamponamiento retiniano durante 42-65 días. El gas en estado puro debe ser diluido con aire (6 ml de gas + 44 ml de aire) antes de la inyección para obtener una concentración no expansiva. Se puede usar como producto desechable o hasta que se consume el contenido de la bombona, permitiendo reducir los costos de cirugía. Está envasado en bombonas de 75 ml con un sistema especial que permite soportar las diferencias de presión y el transporte por vía aérea sin problemas ni limitaciones. Incluye una jeringa pre-ensamblada

a un filtro esterilizador de 0,2 μm , conector y cánula de 30G (GIS juego de inyección de gas) para asegurar el volumen preciso de gas, su esterilización, suministro y facilitar la manipulación del producto en quirófano.

Presentación:

Caja que incluye:

- El gas se encuentra contenido en una bombona de aluminio de grado médico. El gas no es estéril, usándose para ello el filtro incluido en el momento de generar la mezcla no expansiva.
- Juego de inyección, que contiene:
 - 1 Jeringa de polipropileno pre-ensamblada a un filtro esterilizador de 0,2 μm .
 - 1 Aguja de 30G y 1 conector
- Pulsera para el paciente con advertencias.
- 12 pegatinas para la trazabilidad del producto.
- Instrucciones de uso.

Fecha de edición: 2 de mayo de 2023, Rev.2.